


Краткое руководство по самостоятельному снятию слепков и получению фотографий зубов

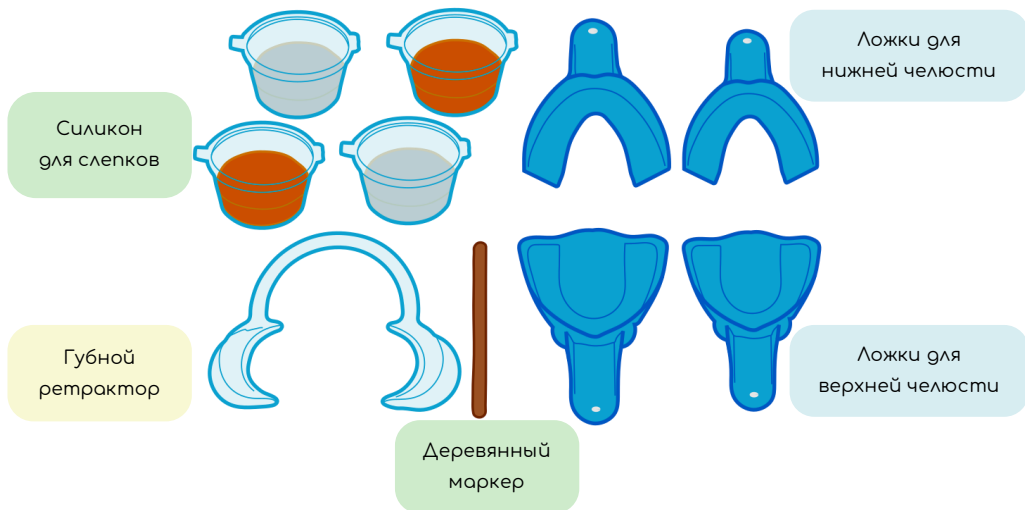

Посмотрите нашу видео-инструкцию, отсканировав QR-код.

Для начала необходимо:


- Достать из коробок слепочный силикон, слепочные ложки; распаковать губной ретрактор и деревянный маркер; разложить все перед собой.



Примеряем слепочные ложки:


- Возьмите маленькую ложку для верхней челюсти, поместите в нее все зубы верхней челюсти и подвигайте ее влево-вправо. Если Вы чувствуете, что зубам «тесно», они не помещаются в ложку или упираются в стенки - примерьте большую верхнюю ложку. Между ложкой и зубами должно быть пространство для слепочного силикона.
- Таким же способом подберите ложку для нижней челюсти.

1.

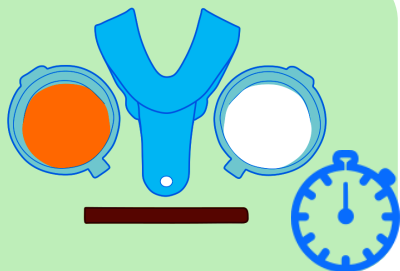


Приготовьте силикон, ложку и деревянный маркер. Откройте приложение «Секундомер» на телефоне.

2.

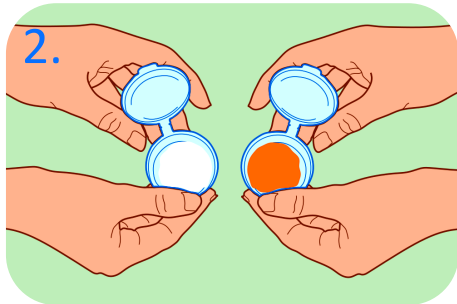

Откройте по одной баночке с силиконом каждого цвета, достаньте его, но пока НЕ СМЕШИВАЙТЕ.


3.

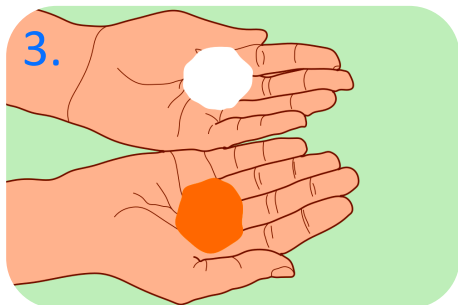

Приготовьтесь к замешиванию силикона. Запустите секундомер на телефоне.




4.

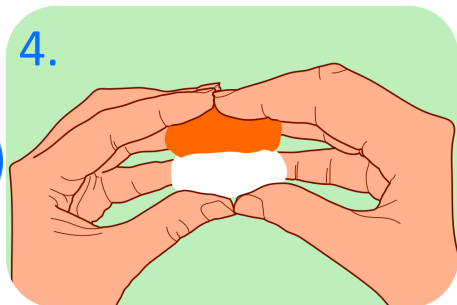


Сложите силиконовые шарики вместе и начните активно перемешивать их между собой.

5.

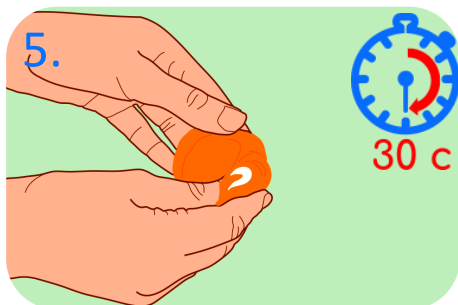


Перемешивайте силикон в течение 30-и секунд до получения массы однородного цвета.


6.

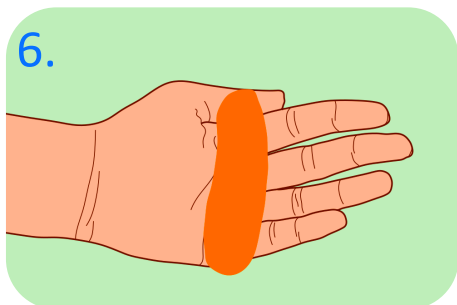


Сформируйте из силикона цилиндр размером с ладонь.

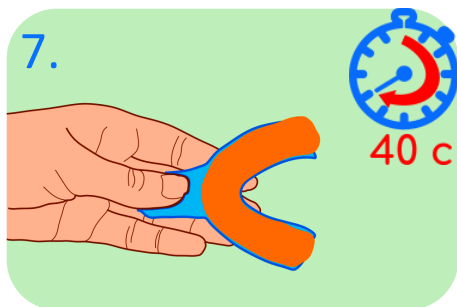


Уложите цилиндр в ложку и равномерно распределите его по всей ее глине.

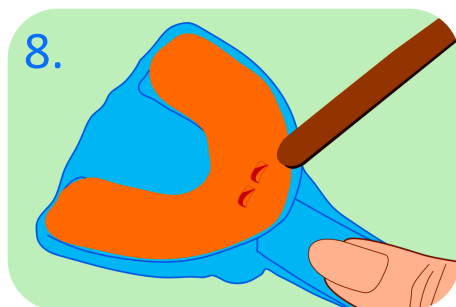




Деревянным маркером сделайте два углубления - ориентира для передних резцов по центру цилиндра.

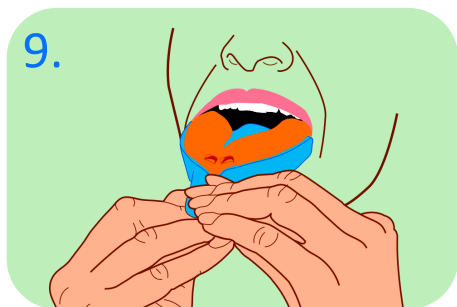

Встаньте перед зеркалом. Поместите слепочную ложку в рот, силиконом к зубам.

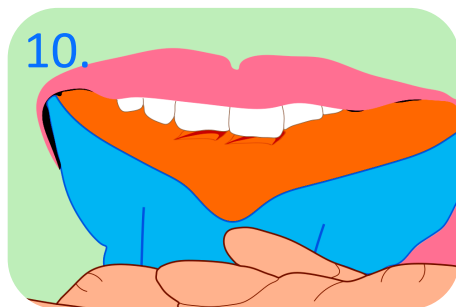

Расположите центральные резцы в углубления. Остальные зубы прилегают к силикону.

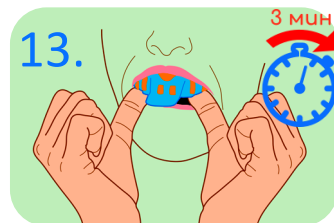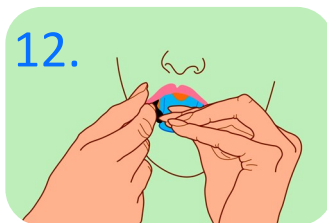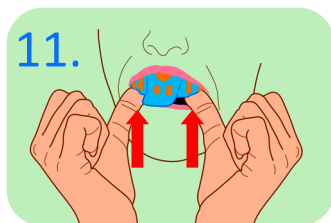

Одним равномерным вертикальным нажатием большими пальцами обеих рук на слепочную ложку погрузите все зубы и десны в силикон. Накиньте губу поверх силикона и ложки. Удерживайте слепочную ложку неподвижно в течение 3-х минут. Затем достаньте слепок из рта и сравните его с картинками на листе «Оцените Ваш слепок».

Оцените Ваш слепок


Качественный слепок зубов содержит в себе всю необходимую информацию для создания прозрачных элайнеров и кап для отбеливания.

Ниже приведен пример хорошего слепка. На нем видны ровные отпечатки зубов, четкий контур десны и граница между десной и зубами.

Оцените Ваш слепок.

Если он похож на образец снизу - Вы прекрасно справились!

Если есть сомнения - переверните страницу, там примеры «неудачных» слепков, которые нужно переделать.

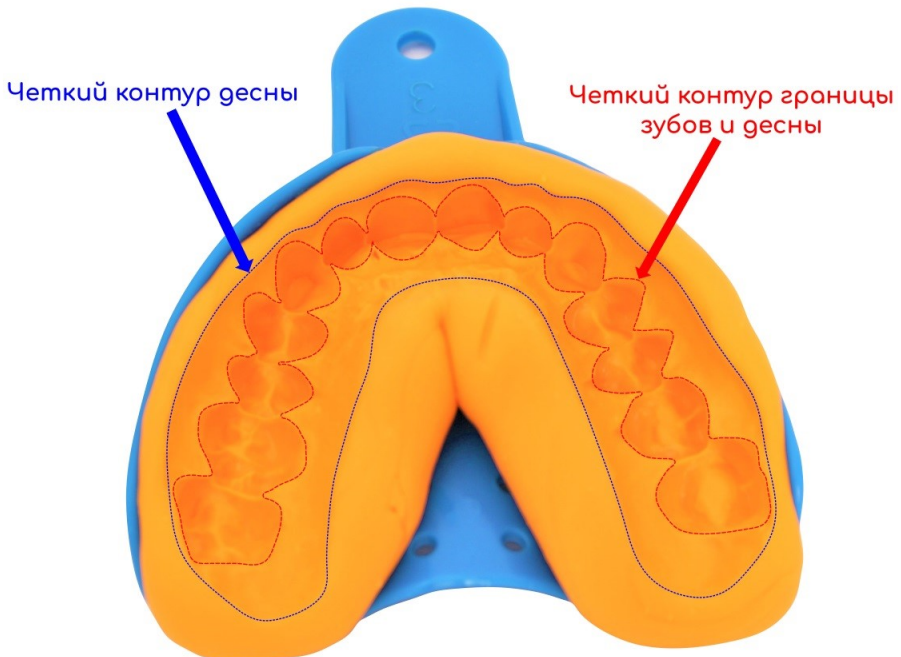

Примеры «неудачных» слепков

Ложка проглядывает
сквозь
силикон



Если слепочная ложка просвечивает сквозь боковые поверхности, то такой слепок неточно передает информацию о форме зубов.

Сделайте еще один слепок. Постарайтесь разместить все зубы по центру силикона. Давите на ложку вертикально, не сдвигайте ее в течение всего времени застывания силикона.



Не виден
край десны

Данный слепок не был дожат до десны. Информация о форме зубов отсутствует.

Повторите слепок, продавлив силикон глубже, до десны.



Плохо перемешаны
компоненты силикона

Компоненты слепочного силикона плохо перемешаны между собой. При этом силикон застывает неравномерно, остаются места незастывшей массы.

В данном случае происходят искажения формы зубов и контуров десны.

Сделайте новый слепок, перемешайте оба компонента силикона до получения однородного цвета.

Если у Вас есть сомнения в оценке качества слепка - просто сфотографируйте его (вид на отпечатки зубов) и отправьте нам через «Центр загрузки» в Вашем личном кабинете **#getfancysmile**.
Наши специалисты оперативно оценят качество слепка и дадут Вам дальнейшие рекомендации.

5.

Фотографируем зубы

- Встаньте поближе к зеркалу, наденьте губной ретрактор.
- Фотографируйте на основную камеру телефона, направив ее на зубы и смотря на отражение экрана в зеркале.
- Все три фотографии лучше делать подряд: после первой фотографии

Фото №1

Сомкните зубы в привычное для Вас положение (жевательные зубы в контакте).
Голова НЕ запрокинута,
НЕ повернута и НЕ наклонена.
Объектив камеры на уровне зубов.

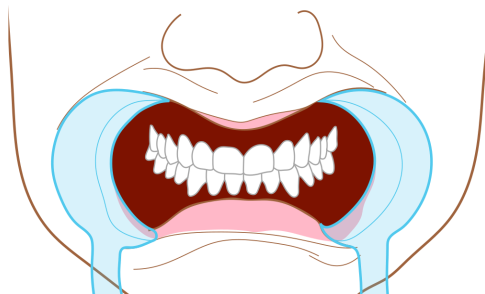


Фото №2

Широко откройте рот и запрокиньте голову назад.
На экране телефона Вы должны видеть жевательные поверхности верхних зубов.

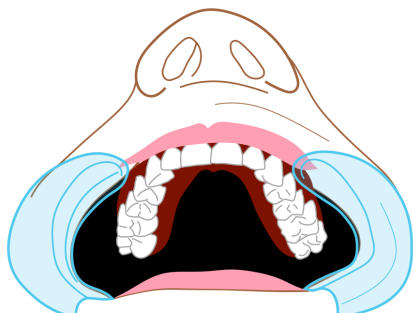


Фото №3

Широко откройте рот, опустите голову вниз (подбородок на грудь).
На экране телефона Вы должны видеть жевательные поверхности нижних зубов.

